


การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เรื่อง

๑ ๒ ๓ ๔
ถุงมือ Sterile พร้อมใช้

หน่วย ข่ายกลาง-ซีกฟอก

สภาพปัญหา

- ถุงมือ **Sterile** ที่เปิดใช้ อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมในการใช้งาน
ได้ทันที พบว่ามี
 - ปัญหาขาด
 - เปื่อยยุ่ย
 - มีรูร้าว
 - สลัดข้าง
 - แป้งในถุงมือมีมาก/น้อยจนเกินไป

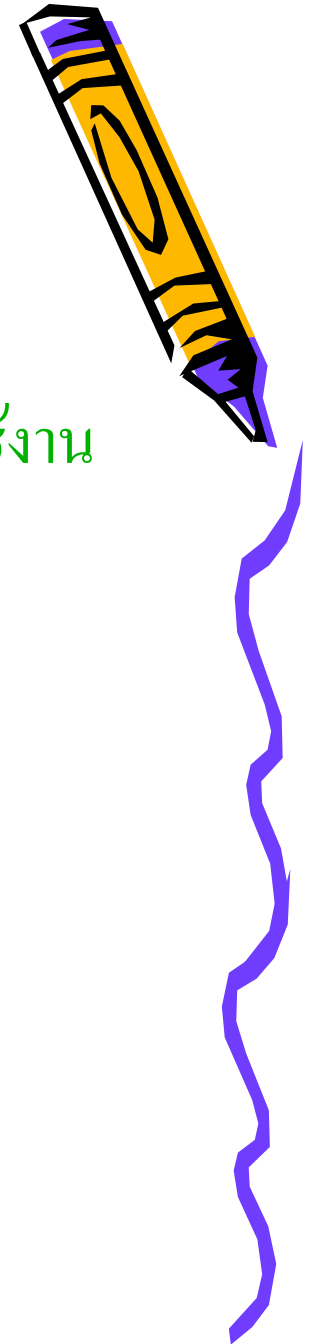


สภาพปัญหา

- **ผู้ใช้** ไม่มีแนวทางหลังการใช้ถุงมือ **Sterile** ที่ถูกต้อง


- **ผู้จัดเตรียม**

- ขั้นตอนการซักถุงมือ
- ขั้นตอนการทำให้ถุงมือแห้ง
- ขั้นตอนการเตรียมถุงมือ
- ขั้นตอนการนึ่งถุงมือ
- การ Re sterile ถุงมือ

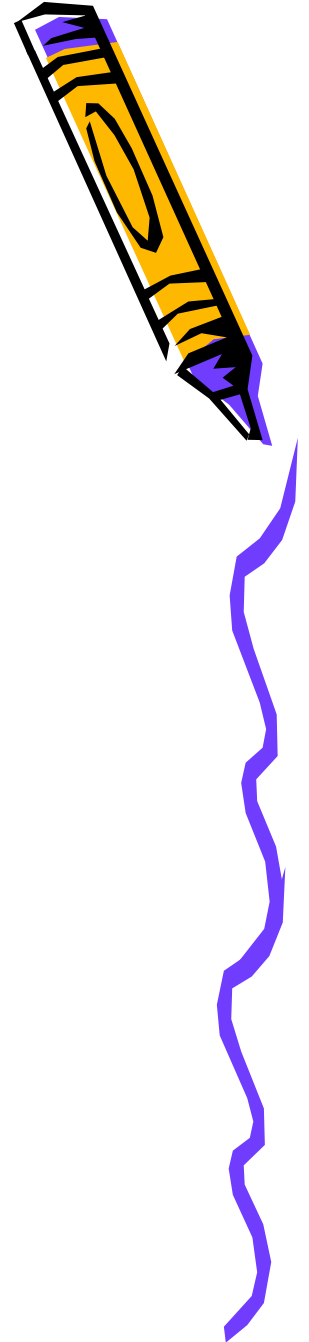



ตั้งเป้า

- ถู่มือ **Sterile** อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 100%

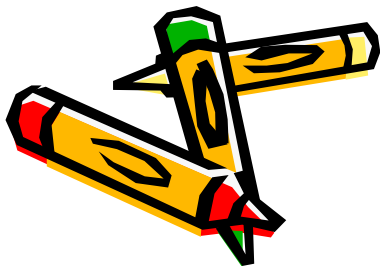

เฝ้าดู


- ไม่มีอุบัติเหตุการฉีกถุงมือ **Sterile** ไม่พร้อมใช้
- ไม่พบอุบัติเหตุการฉีกถุงมือ **Sterile** ที่ใช้แล้ว
 - มีคราบเลือด/สารคัดหลั่งติดมา
 - ถุงมือติด/พันกันอยู่
 - ไม่ได้แช่อยู่ในน้ำ
 - แช่รวมอยู่กับอุปกรณ์การแพทย์อื่น

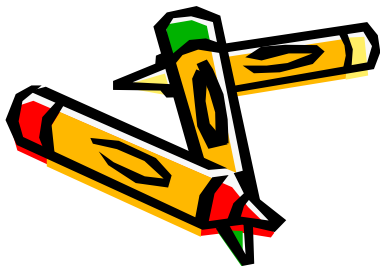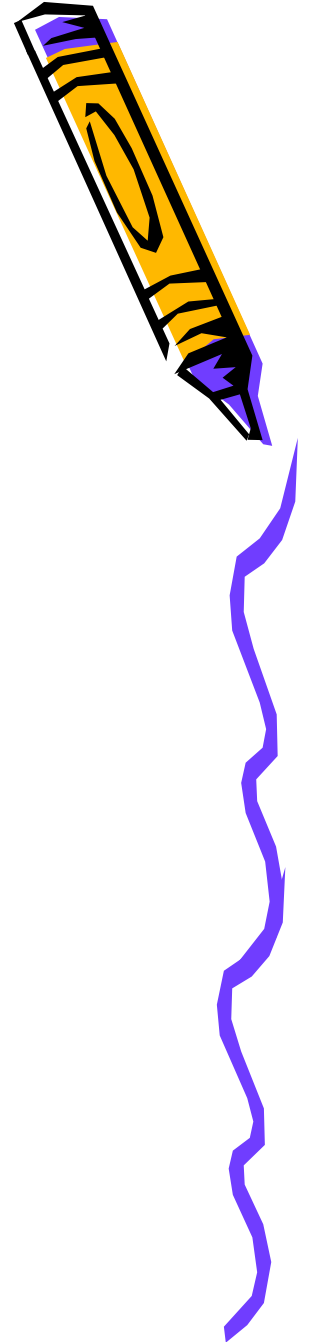

ปรับเปลี่ยน

- ผู้ใช้ถุงมือ

- ขอความร่วมมือโดยการทำหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยบริการที่ใช้ถุงมือ **Sterile** ทราบแนวทางปฏิบัติหลังการใช้ถุงมือ **Sterile**

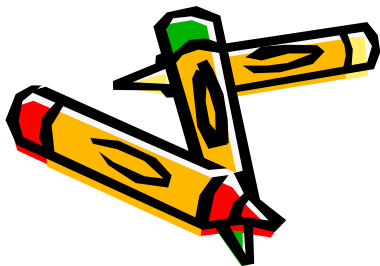

ปรับเปลี่ยน


- ผู้ปฏิบัติ

- 1. ขั้นตอนการชักถุงมือ

- เช็บถุงผ้าที่เป็นรูตาข่ายใส่ถุงมือลงชักในเครื่องชักผ้าชนิดมีฝาเปิดด้านบน

- 2. ขั้นตอนการทำให้ถุงมือแห้ง

- นำถุงมือที่ชักแล้วในถุงผ้าตาข่ายวางบนตะแกรง หรือตะกร้าให้สะเด็ดน้ำ นำไปอบในเครื่องอบผ้าขนาดกลาง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 1 ชั่วโมง

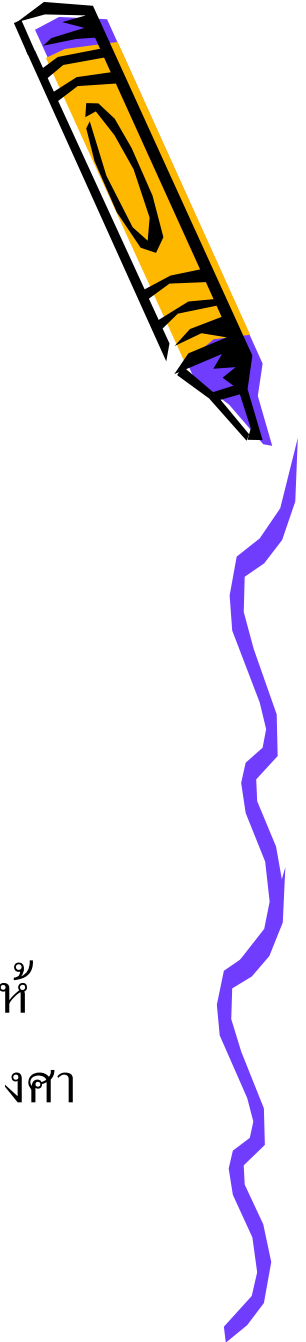

ปรับเปลี่ยน

3. ขั้นตอนการเตรียมถุงมือ

- ใส่แป้งในเครื่องคลุกถุงมือ ใช้แป้ง 1 ถ้วยตวง ต่อถุงมือ 1 กิโลกรัม
- ผู้ปฏิบัติมีการตรวจเช็คถุงมือ ทำสัญลักษณ์ของการใช้ถุงมือไว้ที่ขอบถุงมือ ด้านบน

4. ขั้นตอนการนึ่งถุงมือ



- ลดจำนวนการบรรจุถุงมือเบอร์ 6 1/2 จาก 20 คู่ เหลือ 10 คู่
- ลดจำนวนการบรรจุถุงมือเบอร์ 7 จาก 20 คู่ เหลือ 15 คู่

ทำภารกิจในอนุภูมิภาค 121 องศาเซลเซียส ความดัน 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เวลา 15 นาที และนั่งเฉพาะหม้อถุงมือ



ปรับเปลี่ยน

- การ Re sterile
 - ผู้ปฏิบัติเปิดเช็ควงมือทุกคู่ที่นำกลับมา Re sterile ถ้าพบว่าชำรุด เปื่อยยุ่ย ขาด ทำการแยกออก

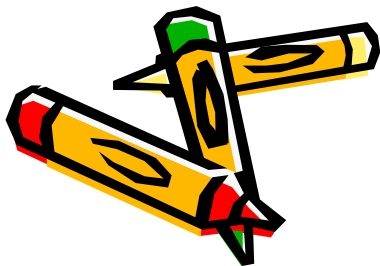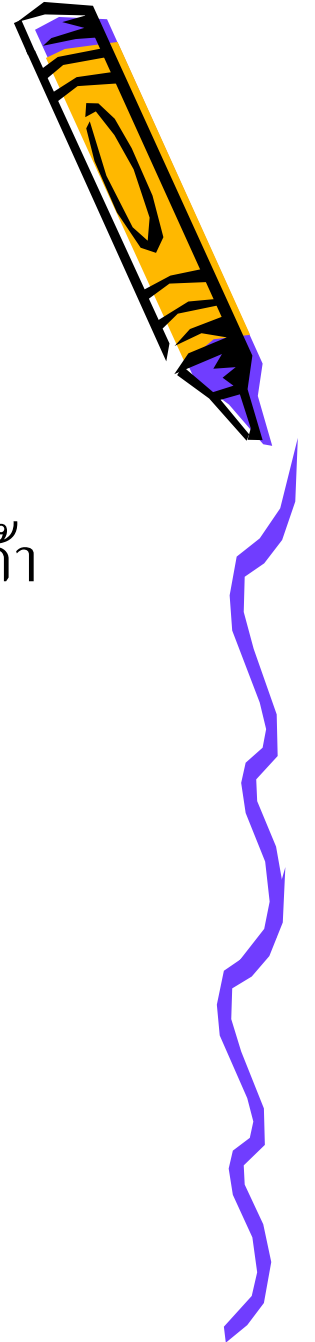



Plan

- วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ถุงมือ **Sterile** อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 100 %

- ผลที่คาดว่าจะเกิด



- ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้งาน **sterile**
 - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความพร้อมใช้ของถุงมือ **sterile**
 - ถุงมือ **sterile** อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
 - ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ถุงมือ **sterile**

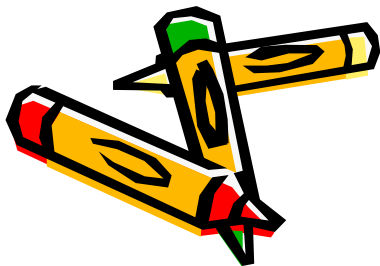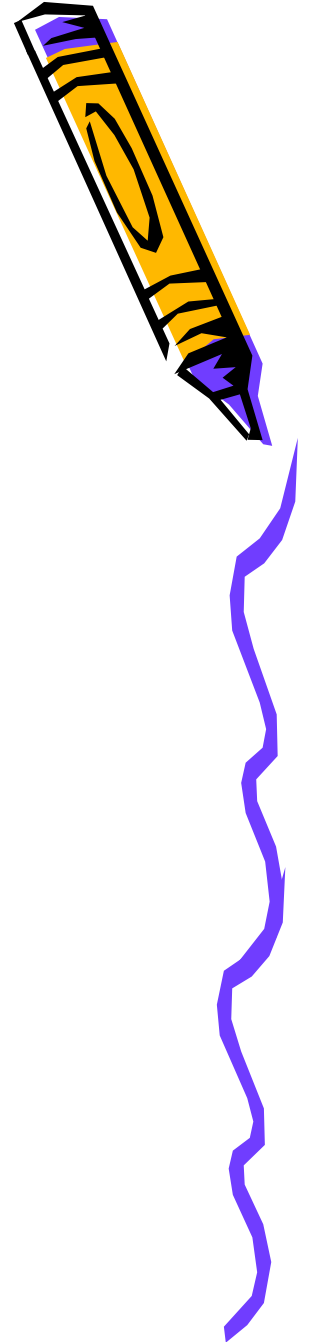

Plan


- แผนการทดสอบ

- 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติหลังการใช้ถุงมือsterile
- 2. เก็บถุงมือเดิมไว้
- 3. เบิกถุงมือใหม่จากคลังวัสดุการแพทย์
- 4. ทำสัญลักษณ์ที่ขอบถุงมือด้านบน
- 5. เก็บตัวอย่างถุงมือที่ผ่านการใช้ในแต่ละครั้ง

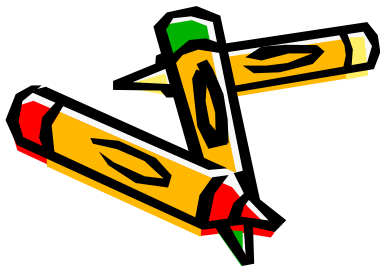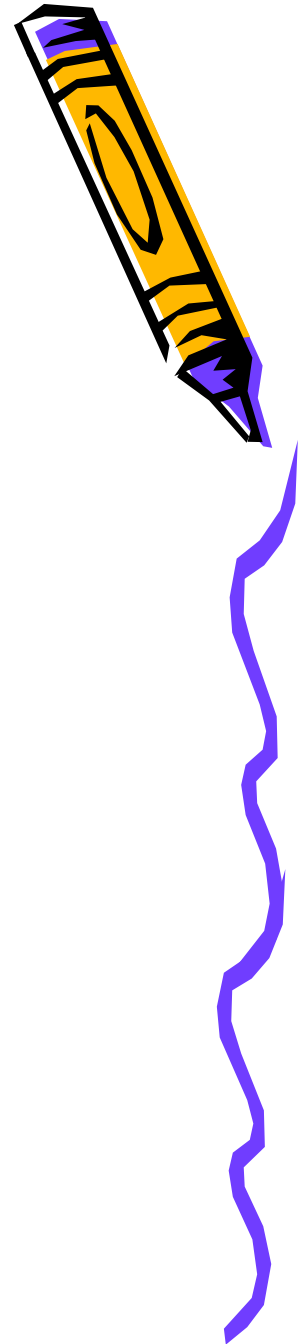



Do

- ประชุมชี้แจงแผนงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ
- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทราบ
- ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด

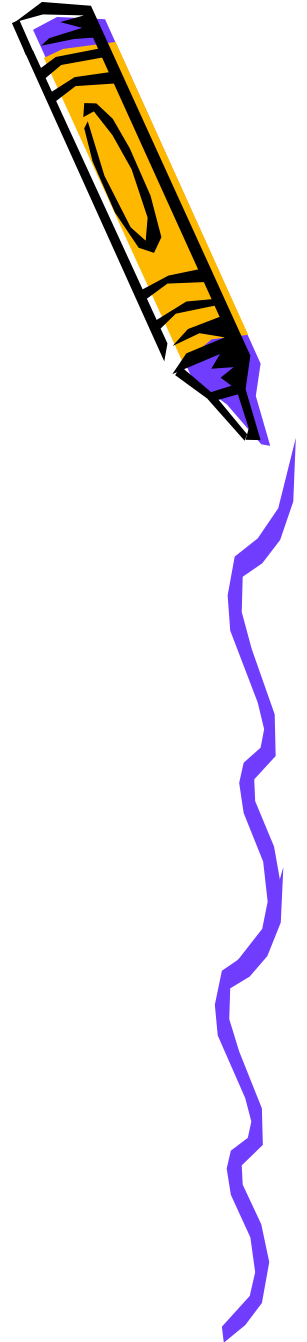

Check

- ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการจัดส่งใบปฏิบัติการให้ทุกครั้ง
- หน่วยจ่ายกลางจัดเก็บปฏิบัติการให้หน่วยบริการทราบ

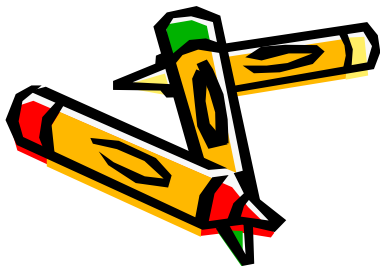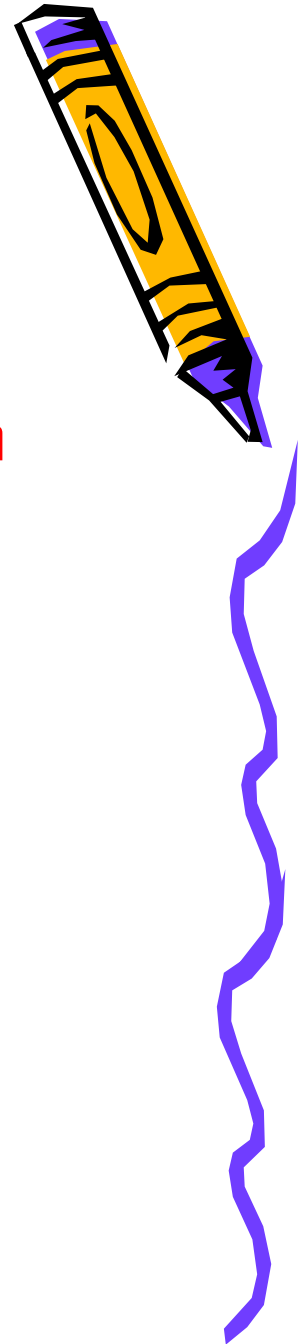

Act

- หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บข้อมูล
จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด นำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อดู
ความก้าวหน้าและข้อบกพร่อง หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป

